



SomGauge är det första verktyget i sitt slag som möjliggör noggrann kalibrering av vertikal dimension med sin justerbara ramp, vilket ger förbättrad enhetsintegritet.

LÄTT ATT ANVÄNDA & RENGÖRA

Ergonomiskt och rejält handtag med tydliga utsticksindikatorer, som är autoklaverbar.

UNDDViker FÖRTIDIG KONTAKT

Justerbar ramp säkerställer jämn kontakt över det ocklusala läget, vilket kommer att minska stoltiden.

FÅNGAR MER AV VERTIKALEN

Minst 3 mm akryltäckning, ledande till en starkare skena & mindre benägen att gå sönder.

Hur man använder SomGauge

Alla skenor är avsedda att titreras från 50 % till 60 % av en patients maximalt framskjutna läge. Därför är våra skenor utformade för att tillverkas i en framskjuten position.

1. Minst 3 mm interincisalt avstånd krävs genom hela den övre och nedre bågen, inklusive mesialhalvan av den sista tillgängliga bakre (terminala) molaren, eller den distala åsen av den sista tillgängliga molaren om full täckning önskas.
2. Bettet ska vara rejält framskjutet utan att böja eller gunga på bettgaffeln.
3. Täckningen av VPS-mediet bör vara tillräcklig för att stänga tänderna med minimal täckning av vävnad.
4. För de flesta patienter är 60 % av maximalt framskjutande läge lämpligt för en startposition. SomGauge gör det möjligt för patienten att hitta denna utgångspunkt lätt och med precision.
5. När en startposition har erhållits ska patienten hålla sig i den positionen i 2-3 minuter. Tandläkaren bör fråga om komforten och justera vid behov.

Tips: När du tar ditt avtryck, se till att käkarnas mittlinjer är raka. För fler SomGauge tips kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

Beställ SomGauge via att kontakta oss via kontaktinformationen nedan