



Nach Therapiebeginn

In den ersten Tagen, in denen Sie die Schlafapnoe-Schiene tragen, könnten Sie morgens beim Herausnehmen der Schiene etwas Zeit benötigen, bis Sie wieder in Ihre gewohnte Bissposition zurückfinden.

Der SomMorning Repositioner (Bisstrainer) hilft Ihnen, Ihren gewohnten Biss wieder zu normalisieren.

Leichte Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit oder vermehrter Speichelfluss können auftreten, klingen aber nach einigen Tagen wieder ab.

Höchster Komfort



Um Ihre Schlafapnoe effizient zu therapieren, sorgen Qualität und Komfort der SomnoDent® Schiene dafür, dass Sie Ihre Schiene problemlos tragen können. Etwa 90 % der SomnoDent® Nutzer bewerten die Schiene als besonders komfortabel¹.

Sie ist diskret und kaum bemerkbar, was das Trinken und Sprechen mühelos ermöglicht.

Hochwertig



Ihre SomnoDent® Schlafapnoe-Schiene wird für Sie mit den hochwertigsten Materialien maßgefertigt. Bei sachgemäßem Gebrauch und sorgfältiger Pflege wird eine langjährige Wirksamkeit erzielt. Die weiche Softinnenschicht sorgt für großen Tragekomfort. Jede Schiene unterliegt einer Gewährleistung*.

*Detaillierte Informationen zur Gewährleistung unter www.somnomed.com/de



Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?

Tel. 09364 813 0 888

SomnoMed Germany GmbH

Gassenwiese 53
97225 Zellingen
T +49 (0) 9364 / 813 0 888
F +49 (0) 9364 / 813 0 886
E-Mail: kontakt@somnomed.com
www.somnomed.com/de

SomnoMed® Produkte sind patentierte und individuell angefertigte Medizinprodukte der Klasse I.

SomnoMed AG

Steinhauserstrasse
746300 Zug, Schweiz
www.somnomed.com

Central production facility:

SomnoMed Philippines
Level 3, Allegro Center,
2284 Passong Tano Ext
Makati City, Philippines



SomnoMed AG ist ISO 13485 zertifiziert.



SomnoMed Philippines is ISO 13485 certified.

2023_01_DE_Patient



Erfolgreiche Schlafapnoe-Therapie mit der SomnoDent®-Schiene



Kassenleistung*

HOCHWERTIGE SCHLAFAPNOE-SCHIENEN MACHEN DEN UNTERSCHIED

Eine individuell für Sie angefertigte Zahnschiene zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) kann Ihnen dabei helfen, erholsam zu schlafen und sich am Tag fit zu fühlen.


* Bei CPAP-Unverträglichkeit übernimmt Ihre Krankenkasse die Kosten.

www.somnomed.com/de

EINE EINFACHE LÖSUNG FÜR IHR SCHLAFAPNOE PROBLEM

Schlafapnoe-Schienen sind eine einfache und komfortable Therapie für die obstruktive Schlafapnoe (OSA) und bieten eine effiziente und bequeme Alternative zum Standard – der CPAP-Maskentherapie. Bei CPAP-Unverträglichkeit werden die Kosten der Schienen von der Krankenkasse übernommen.

Um Ihre Atemwege offen zu halten, schiebt die **SomnoDent®** Schlafapnoe-Schiene Ihren Unterkiefer leicht nach vorne. Dadurch werden Atemaussetzer vermieden und Sie können wieder völlig normal atmen. Als Folge dessen sind Sie am nächsten Tag ausgeruht und fit.

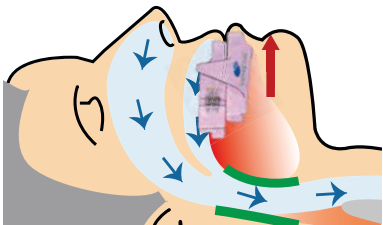

DER WEG ZUR SCHIENE

1

Wenn die Maskentherapie bei Ihnen nicht durchgeführt werden kann, z.B. wegen Panikattacken oder Unverträglichkeit der Maske, kann Ihnen Ihr Schlafmediziner eine Schlafapnoe-Schiene verschreiben und Sie an einen spezialisierten Zahnarzt überweisen. Ist Ihr Zahnstatus für eine Schiene geeignet, wird der Zahnarzt die benötigten Unterlagen herstellen und Kontakt mit uns aufnehmen, um Ihre maßgefertigte SomnoDent® Schiene herstellen zu lassen.

2

Bei Ihrem nächsten Zahnarztbesuch wird Ihre Schlafapnoe-Schiene eingesetzt und ggf. angepasst. Um einen ordnungsgemäßen Sitz sicherzustellen, werden Sie eingewiesen wie Ihre Schiene korrekt eingesetzt/herausgenommen wird und wie man sie richtig reinigt und pflegt.

3

Ein Besuch beim Schlafmediziner ist nach einiger Therapiezeit mit der Schlafapnoe-Schiene nötig, um die Resultate der Therapie kontrollieren zu können.

4

Schlafapnoe ist eine lebenslange Erkrankung, die dementsprechend therapiert werden muss. Sie werden sehr schnell eine Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes bemerken, trotzdem ist die Schienentherapie nicht für jeden Patienten geeignet. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

SOMNODENT® PRODUKTFAMILIE

Für Schlafapnoe Patienten ist die klinisch erprobte **SomnoDent®** Schlafapnoe-Schiene eine komfortable Therapiemethode, die es Ihnen erlaubt, während des Schlafes normal durchzuatmen, ohne störende Schläuche und Masken. SomnoDent® Schlafapnoe-Schienen werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.



KLINISCH ERPROBT

Wir von SomnoMed® stehen zu unserem Qualitätsversprechen, indem wir Ihnen Schlafapnoe-Schienen anbieten, die in zahlreichen klinischen Studien ihre Wirksamkeit beweisen. In einer Studie berichten 9 von 10 Patienten, dass sich ihre Schlafqualität verbesserte, während Sie SomnoDent® verwenden.^{1,2}

¹ AM/Respir Crit Care Med Vol 163. Pp 1457-1461, 2001

² <https://somnomed.com/us/physicians/medical-education-sleep-medicine/clinical-evidence/>